

Brugsanvisning for ekstruderingsøje og Caplin-krog med guldkæde

Tilsigtet formål: Dette er ortodontisk tilbehør til fast apparatur til korrektion af malokklusion og dentofaciale deformationer hos mennesker. Den guldbelagte kæde består af en netbase og en kæde.

Indikasjon for bruk: Dental malokklusion. Kjeveortopedisk behandling.

Kontraindikasjoner: Pasienter som har den periodontale sykdommen bør ikke aksepteres for kjeveortopedisk behandling før de er helbredet. Gravide og barn før tannovergangsperiode bør ikke tillates for kjeveortopedisk behandling.

Pasientmålgruppe: Enhver person med malokklusion som gjennomgår kjeveortopedisk behandling.

Tiltentk bruker: Helsepersonell: tannlege eller kjeveortoped.

Steriliseringsinstruksjoner

Før produktet anvendes på patienten, skal den guldbelagte kæde steriliseres i en autoklave eller i en glutaraldehydopløsning.

Sterilisering med autoklave

- Placer ekstruderingsøjet/Caplin-krogen i en steriliseringspose.
- Autoklavér i mindst 10 minutter ved en temperatur på 132–134 °C.
- Minimum tørretid: 15 minutter.

Sterilisering med glutaraldehyd-desinfektionsmiddel

- Placer ekstruderingsøjet/Caplin-krogen i en beholder med glutaraldehyd-desinfektionsmiddel i 10 minutter.

Bondinginstruksjoner

Fastgør netbasen på en egnet placering på tanden (brug et kvalificeret ortodontisk klæbemiddel) i henhold til brugsanvisningen fra leverandøren.

Når forbindelsen mellem kæden og tandkronen har opnået tilstrækkelig styrke, tilpasses den elastiske ring gennem hulrummet i kæden.

Når behandlingen er afsluttet, fjernes den guldbelagte kæde med et egnet afmonteringsinstrument.

Transport- og opbevaringskrav

Den guldbelagte kæde bør opbevares indendørs ved en relativ luftfugtighed på under 80 %, med god ventilation og uden tilstedeværelse af ætsende materialer.

Forholdsregler og advarsler

1. Dette produkt er kun beregnet til engangsbrug og må ikke genbruges.
2. Produktet må kun anvendes af kvalificerede tandlæger i henhold til klinisk praksis.
3. Ved første behandling bør tandlægen informere patienten om, at enkelte individer kan få en allergisk reaktion over for materialet i kæden. Opstår oral allergi, skal patienten behandles omgående.
4. Klinikken bør informere patienten om at undgå hård og klistret mad efter behandlingen (f.eks. majs, æbler osv.) og at opretholde god mundhygiejne.
5. Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
6. Efter brug skal den guldbelagte kæde bortskaffes som medicinsk affald.
7. Den maksimale kraft under ortodontisk behandling må ikke overstige 2,5 N.

Advarsel! Enheden indeholder nikkel og krom.

Symbol forklaring:



USA: Må kun udleveres efter recept. Produktet må kun anvendes af professionelle tandlæger.



Gestenco International AB
Fridkullagatan 14, SE-412 62 Gothenburg, Sweden
Phone +46 31 81 00 35, www.gestenco.com