

Anbefalede vaske-, håndterings- og steriliseringsinstruktioner for Ixion™-instrumenter

Instrumenter er ikke sterile ved modtagelse og skal steriliseres før brug i overensstemmelse med følgende instruktioner:

1. Fjern al emballage inden rengøring og sterilisation. Overskrid ikke 160°C.
2. For korrekt brug samt oplysninger om maksimale og minimale trådstørrelser, henvises til www.ixion-instruments.co.uk, den aktuelle Ixion-katalog eller trådstørrelsesmarkeringen på instrumentets krop.

Rengøringsinstruktioner

Fjern overskydende olie

Brug en engangspapirhåndklæde til at fjerne eventuel overskydende olie.

Manuel rengøring

1. Brug en næsten neutral rengøringsmiddel (en neutral rengøringsmiddel forhindrer pletter og misfarvning af instrumentets overflade).
2. Sørg for, at instrumentet rengøres grundigt på alle overflader og samlinger.
3. Skyl under rent, rindende vand i 3 minutter. Gentag processen, hvis nødvendigt.
4. Tør med en papirhåndklæde.

Bemærk: Manuel rengøring anbefales ikke for IX841.

Automatisk rengøring

1. Brug kun validerede vaskemidler, der er egnet til instrumenterne og vaskemaskinen. (En neutral rengøringsmiddel vil forhindre pletter og misfarvning af instrumentets overflade).
2. Efter vask i maskinen skal instrumenterne kontrolleres for renhed. Gentag vaskecyklussen, hvis nødvendigt.
3. Undersøg instrumenterne for skader eller korrosion. Skærekantene skal være fri for defekter, og aftagelige spidser skal sidde sikkert.
4. Tør grundigt med en papirhåndklæde eller varm luft ved en temperatur, der ikke overstiger 160°C.

Bemærk: Instrumenterne skal være helt tørre før sterilisation. Vær særlig opmærksom på at tørre samlinger, fjedre, spidser og skruer. Eventuelt resterende vand kan medføre overfladekorrosion.

Sterilisationsinstruktioner

- **Smøring:** Smør altid samlinger og hængsler før sterilisering med en dampgennemtrængelig smøremiddel (f.eks. Ixion instrumentolie IX010).
 - **Placering:** Instrumenterne skal placeres i perforerede instrumentbakker eller steriliseringsbakker. Sørg for, at skærekantene ikke rører ved bakkerne for at undgå skader.
 - **Flere instrumenter:** Når flere instrumenter steriliseres samtidig, skal de placeres, så de ikke rører hinanden, da dette kan medføre skader.
 - **Autoklaver:** Brug kun validerede vakuumautoklaver, og overskrid ikke 160°C eller producentens maksimale belastning.
-

Yderligere oplysninger

- **Ultralydsbade:** Validerede ultralydsbade kan anvendes sammen med godkendte rengøringsmidler. Følg producentens anvisninger for både udstyr og rengøringsmiddel.
 - **Automatisk rengøring:** DB Orthodontics anbefaler, at rengøringen følger kravene i CFPP, NI/CFPP, SHTM og WHTM-publikationerne, hvor det er relevant.
 - **Overholdelse:** Ixion-instrumenternes vaske- og steriliseringsprocesser er valideret af DB Orthodontics og overholder ISO 17665-1.
-

Garanti

- Ixion-instrumenter er dækket af en garanti mod materialefejl og håndværksmæssige defekter i 5 år.
 - DB Orthodontics tilbyder gratis slibning inden for 1 år efter købet af en skæretang, der ikke kan klippe den tilsigtede trådstørrelse.
 - **Garantibetingelser:** Misbrug, forkert anvendelse eller manglende vedligeholdelse ophæver garantien.
 - **Reparation eller udskiftning:** DB Orthodontics' ansvar er begrænset til, efter eget skøn, at reparere, udskifte eller kreditere et instrument med defekter.
 - **Vedligeholdelse:** Følg anbefalede rengørings-, steriliserings- og smøreinstruktioner for at sikre optimal ydeevne. Hyppigt brugte skæreinstrumenter bør genoprettes efter behov, og samlinger skal smøres med medicinsk godkendt smøremiddel under hver dekontaminationsprocedure.
 - **Udelukkelse:** Garantien dækker ikke rutinemæssig vedligeholdelse, slibning eller genopretning.
-

Ansvarsbegrænsning

- DB Orthodontics er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår i forbindelse med dette produkt, uanset om det er direkte, indirekte, specielle, hændelige eller afledte skader. Dette gælder uanset det juridiske grundlag, inklusiv garanti, kontrakt eller uagtsomhed.
- Begrænsningen gælder ikke krav fra tredjeparter om personskade.

Bemærk: Garantien dækker ikke rutinemæssig vedligeholdelse, slibning, mindre reparationer af skadespids eller genopretning. Krav eller serviceanmodninger skal sendes til din distributør.

Kontakt:

DB Orthodontics Limited Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire BD20 0EF United Kingdom Tel: +44 [0] 1535 656 999 Fax: +44 [0] 1535 656 969 email: sales@dbortho.com web: www.lxion-instruments.com